

Kryptopyrrol (L 120)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen**
- 1 x Testanleitung**
- 1 x Lichtgeschütztes Umröhrchen**
- 1 x Urinmonovette**
- 1 x Postversandtasche / Rückumschlag**

Anleitung:

Die Sarstedt-Urin-Monovette muss mit dem **Morgenurin** gefüllt werden. Wichtig für ein genaues Ergebnis ist, dass Sie den gesamten Morgenurin verwenden, d.h. in den letzten sechs Stunden vorher sollte die Blase nicht entleert worden sein.

- Fangen Sie den **ersten Morgenurin** nach dem Aufstehen in dem Urinauffangbecher auf (oder in einem entsprechend sauberen Gefäß).
- Nun befüllen Sie die Sarstedt-Urin-Monovette (dazu den kleinen Verschluss abdrehen, die gelbe Plastikspitze aufsetzen, an dem Kolben ziehen bis das Röhrchen vollständig gefüllt ist und den Kolben danach an der Sollbruchstelle abbrechen, Plastikspitze entfernen und den Verschluss wieder aufdrehen)
- Nun stecken sie das Urinröhrchen in das braune Umverpackungsröhrchen.
- Plastikbecher und Pipette können anschließend entsorgt werden.
- Bitte kleben Sie den beiliegendem Aufkleber beschriftet auf die Sarstedt-Urin-Monovette.

Bitte ProbengefäÙe unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**
- **Material = Urin ankreuzen**

Bitte geben Sie das beschriftete Urinröhrchen in das schwarze Transportröhrchen (SchutzgefäÙe für den Postversand) und diese zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.

Wichtig: Bringen Sie das Testset möglichst schnell auf den Postweg. Ein Versand über das Wochenende und über Feiertage hinweg sollte vermieden werden.