

Neurotransmitter im Urin Basis (F500) + Plus (F510) + Serotonin (F550) + Adrenalin (F600) + D-Arabinitol (A125) + organische Säuren (E408) + Marker des Vitamin-Stoffwechsels (E435)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen**
- 1 x Testanleitung**
- 1 x Zentrifugenröhrchen stabilisiert**
- 1 x Transferpipette**
- 1 x Patientenaufkleber**
- 1 x Transportumröhrchen**
- 1 x Postversandtasche / Rückumschlag**

Anleitung:

Das Urinröhrchen mit weißer Kappe muss mit dem **zweiten Morgenurin** bis zur Markierung oben gefüllt werden.

- Fangen Sie den zweiten Morgenurin nach dem Aufstehen in dem Urinauffangbecher auf (oder in einem entsprechend sauberen Gefäß).
- Befüllen Sie mit der beiliegenden Pipette das Urinröhrchen mit der weißen Kappe bis zur Markierung oben - ca. 5 mm unter dem geschlossenen Deckel. Bitte achten Sie darauf, dass die Stabilisatorsubstanz in dem Röhrchen verbleibt.
- Plastikbecher und Pipette können anschließend entsorgt werden.

Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**
- **Material = Urin ankreuzen**

Bitte geben Sie das beschriftete Urinröhrchen in das weiße Transportröhrchen (Schutzgefäß für den Postversand) und dieses zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.