

Gliadorphin und Casomorphin (C710)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen*
- 1 x Testanleitung*
- 1 x Transferpipette*
- 1 x Zentrifugenröhrchen stabilisiert*
- 1 x Transportumröhrchen braun*
- 1 x Patientenaufkleber*
- 1 x Postversandtasche / Rückumschlag*

Anleitung:

Das Urinröhrchen mit weißer Kappe muss mit dem **ersten Morgenurin** bis zur Markierung oben gefüllt werden.

- Fangen Sie den ersten Morgenurin nach dem Aufstehen in dem Urinauffangbecher auf (oder in einem entsprechend sauberen Gefäß).
- Stoßen Sie das Urinröhrchen (weiße Kappe) mehrmals mit dem Boden auf eine feste Unterlage, damit sich das (ungiftige) Stabilisierungspulver am Boden sammelt.
- Befüllen Sie mit der beiliegenden Pipette das Urinröhrchen mit der weißen Kappe bis zur Markierung oben - ca. 5 mm unter dem geschlossenen Deckel. Bitte achten Sie darauf, dass die Stabilisatorsubstanz in dem Röhrchen verbleibt.
- Nun stecken sie das Urinröhrchen in das braune Umverpackungsröhrchen.
- Plastikbecher und Pipette können anschließend entsorgt werden.

Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- *Namen*
- *Datum*
- *Material = Urin ankreuzen*

Bitte geben Sie das beschriftete Urinröhrchen in das weiße Transportröhrchen (Schutzgefäß für den Postversand) und dieses zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.