

## Pee-Spot (A560)

**ACHTUNG!**  
Test ist nicht für  
Diabetiker geeignet!




### Testanleitung

#### Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen
- 1 x Testanleitung
- 1 x Urinröhrchen (Pee Spot)
- 1 x 2 Liter Urinsammelbehälter
- 1 x Behälter mit Zucker
- 1 x Röhrchen mit Stabilisierungsflüssigkeit
- 1 x Transportumröhrchen
- 1 x Patientenaufkleber
- 1 x Postversandtasche / Rückumschlag

#### Anleitung:

Der Test muss morgens nüchtern durchgeführt werden. Bitte lösen Sie den Zucker in dem Gefäß mit 200 ml lauwarmem Wasser auf und trinken die Lösung morgens nüchtern. Füllen Sie die Stabilisierungsflüssigkeit in den Sammelurinbehälter und sammeln Sie für 4 bis 5 Stunden den Urin. In dieser Zeit sollten keine zuckerhaltigen Lebensmittel (z.B. Brot, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Kuchen) und Getränke konsumiert werden. Nach drei Stunden können Sie eine leichte Mahlzeit ohne Zucker zu sich nehmen (z. B. Fisch, Fleisch, Rohkost, Gemüse). Ist eine ausreichende Menge Urin vorhanden, öffnen sie den dichten Schraubdeckel (1) der Pee-Spot-Röhre (2) und ziehen den Pee-Spot am kleinen Griff (3) heraus; bewahren Sie die Röhre und den Deckel auf.

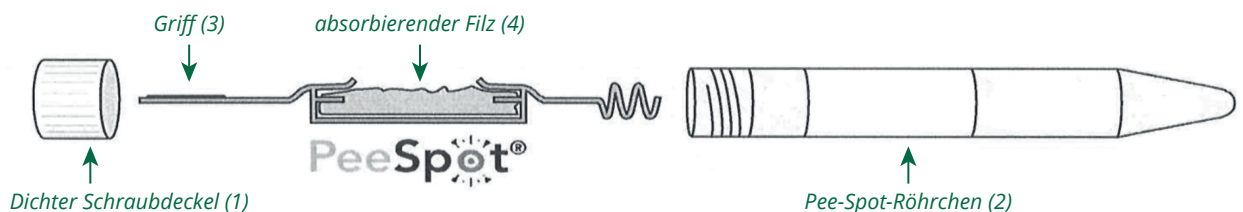

Halten Sie nun den Pee-Spot fest am kleinen Griff (3) und tauchen den absorbierenden Filz (4) in den Sammelurinbehälter. Danach den Halter mit dem getränkten Filz zurück in die Pee-Spot Röhre geben und mit dem Schraubdeckel wieder fest verschliessen.

#### Bitte unbedingt das Pee-Spot-Röhrchen beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**
- **Material**

Bitte geben Sie die beschrifteten Urinmonovetten in die weißen Transportumröhrchen (Schutzgefäße für den Postversand) und diese zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.