

Melatonin-Bestimmung (Schlafprofil) (O380)



Testanleitung

Speichelproben um 22.00 Uhr, 24.00 Uhr und 2.00 Uhr in der Nacht

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen**
- 1 x Testanleitung**
- 3 x Speichelröhrchen**
- 1 x Transportumröhrchen**
- 1 x Postversandtasche / Rückumschlag**

Anleitung:

Bitte spülen Sie zuerst Ihren Mund mit klarem Wasser aus.

Die Entnahme der Speichelprobe muss unbedingt vor dem Zähneputzen oder frühestens 30 Minuten nach dem Zähneputzen erfolgen.

Wichtig!!! Die Proben müssen im Dunkeln gewonnen werden!!!

Durchführung:

- Die Speichel-Probenröhrchen müssen um **22.00, 24.00 und 2.00 Uhr in der Nacht** mit dem Speichel gefüllt werden.
- Den Speichel in das Speichel-Probengefäß geben (das Röhrchen muss halb gefüllt werden, ohne Schaumbildung!!!)

Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**
- **Uhrzeit**

Nun stecken Sie das beschriftete Speichel-Probenröhrchen in das Umverpackungs-röhrchen (weiss), zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in den Briefumschlag und geben es schnellstmöglich zur Post.

Die Proben bis zur Versendung bitte im Kühlschrank aufbewahren.