

Schwermetalle vor und nach Chelattest

(I113 , I114 , I130)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen**
- 1 x Testanleitung**
- 1 x 2 Liter Urinsammelbehälter**
- 4 x Transportumröhrchen**
- 4 x Urinmonovette**
- 1 x Urinbecher**
- 1 x Bestellschein Victoria Apotheke**
- 1 x Postversandtasche / Rückumschlag**

Zur Testvorbereitung sollte ca 2 Wochen vor Chelatierung das Sicherheitsprofil Chelat (I 927) durchgeführt werden:

Blutuntersuchung: 2SZ, NaF, Hep, EDTA

Testanleitung - Chelatierung:

- 1.** 2 Urinmonovetten mit Urin befüllen (vor Chelat – falls gewünscht)
- 2.** Chelatierung
- 3.** Urinprobe nach Chelat sammeln: **3-5 h nach Beginn der Chelatierung.**

Je höher die Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) desto kürzer reicht die Sammelzeit.
Aus dem Sammelurinbehälter die weiteren 2 Urinmonovetten befüllen.

Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**
- **Material**
- **vor Chelat**
- **nach Chelat**

Bitte geben Sie die beschrifteten Urinmonovetten in die weißen Transportumröhrchen (Schutzgefäße für den Postversand) und diese zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.