

Stuhl Probengewinnung

biovis'
DIAGNOSTIK MVZ



Liebe Patientin, lieber Patient,

um eine hohe diagnostische Sicherheit der Stuhluntersuchung zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte bei der Probenentnahme:

A. Ist Ihr Test-Set vollständig?

Bitte überprüfen sie zunächst, ob Ihr Test-Set vollständig ist:
Das Stuhlentnahmeset besteht aus einem

Transportröhrchen (Umverpackung)
und einem Probenröhrchen mit in den Deckel integriertem Löffel
(bitte mit Namen und Datum beschriften)

B. Stuhlprobengewinnung

An den Tagen vor der Probenentnahme sollten möglichst keine extremen Ernährungsumstellungen erfolgen, essen Sie also so wie immer.

a. Damit der Stuhlgang nicht mit Wasser in Berührung kommt, benutzen Sie bitte den **beiliegenden Stuhlfänger** (Anwendung siehe Aufdruck).

b. Entnehmen Sie mit dem Löffel **an mehreren Stellen Proben** und befüllen Sie das **Stuhlröhrchen (kleines Röhrchen, 3/4 befüllen)** damit. Der Löffel darf bei der Probenentnahme **nicht mit dem WC in Kontakt kommen**, da Putz- und Desinfektionsmittel das Ergebnis verfälschen könnten.

c. Schrauben Sie dann den Deckel (samt Löffel) wieder auf das Röhrchen und stecken Sie das Röhrchen nur noch in das Transportröhrchen.

d. Bitte überprüfen Sie, ob auf dem Anforderungsbogen ankreuzt ist, **ob Sie Privatversichert oder Selbstzahler** sind. Leistungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse erfordern einen besonderen Überweisungsschein.

e. Die Transportröhrchen in den beiliegenden Umschlag verpacken und bevorzugt in einer Postfiliale abgeben (**bitte nicht am Freitag oder Samstag abschicken!!!**)