

# Entnahme-Anleitung Kapillarblut (Arzt/ Therapeut)



**CapiSave** (mit stab. Flüssigkeit)  
Mindestvolumen: 300 µl  
(Kapillarblut/venöses Blut)

Bitte bis zur Markierung -  
600 µl befüllen

stabilisierende Flüssigkeit



Wärmen Sie Ihre Hände, z.B. an einer warmen Tasse, damit die Durchblutung der Finger verbessert wird.



Öffnen Sie den Deckel des Kapillarblutröhrchens.



Reinigen Sie Ihren Mittel- oder Ringfinger vor der Blutentnahme mit dem Alkoholtupfer und lassen Sie den Alkohol eintrocknen.



Drehen Sie die blaue Kappe von der Lanzette. Drücken Sie die Lanzette fest an die Außenseite des Fingers und lösen die Lanzette aus.


Verwerfen Sie den ersten Tropfen Blut, da dieser viel Gewebsflüssigkeit enthält.




Massieren Sie den Finger in Richtung der Einstichstelle, damit sich ein hängender Tropfen bilden kann.



Streifen Sie den hängenden Blutstropfen am Gefäß ab, bis die vorgegebene Füllhöhe von 0,5 ml erreicht ist.

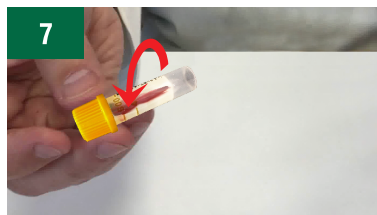


Verschließen Sie das Röhrchen mit dem Deckel und schwenken das Röhrchen leicht.

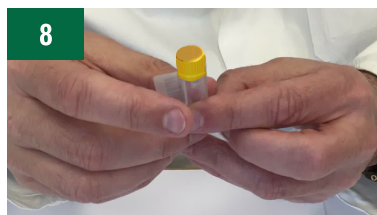

Bitte kleben Sie den beigefügten Barcode auf das Kapillarblutröhrchen, stecken Sie dieses in das beiliegende Umgefäß und schrauben dieses zu.

## BloodSpot

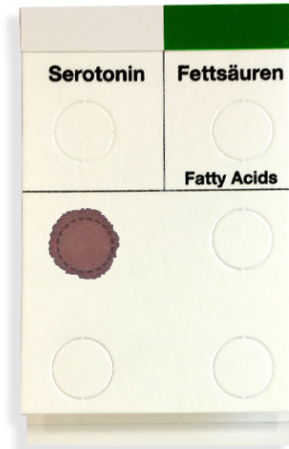

Bringen Sie den großen hängenden Blutstropfen direkt auf das Feld - bis das Feld zu 100% gefüllt ist.

Bitte unbedingt beachten:


Verwenden Sie für die Serotonin- und die Fettsäure-Untersuchungen nur die dafür vorgesehenen Felder.



**Serum**

Mindestvolumen: 300 µl  
(Kapillarblut/venöses Blut)

Bitte bis zur Markierung -  
300 µl befüllen

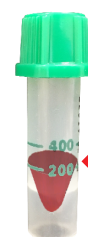

**Heparin**

Mindestvolumen: 200 µl  
(Kapillarblut/venöses Blut)

Bitte bis zur Markierung -  
200 µl befüllen

Streifen Sie den hängenden Blutstropfen am Gefäß ab, bis die vorgegebene Füllhöhe erreicht ist.